

Lehnen GmbH
Kleinicher Straße 10
D - 54472 Longkamp
Tel. 06531/50057-0
Fax 06531/50057-1022



Instrukcja obsługi

do siedzisk natraskowych, (montaż naścienny) L120010*; L122110*

Wybrali Państwo produkt firmy Lehnen. Jesteśmy pewni, że będzie on stanowił użyteczną pomoc oraz przyczyni się do większej mobilności. Nasze produkty wytwarzane są z zachowaniem zaokrąglonych wytycznych dotyczących jakości.

Należy bezwzględnie przestrzegać naszych wskazówek dotyczących montażu. Montażu może dokonywać wyłącznie firma specjalistyczna.

Elementy montażowe

Załączone do każdego artykułu elementy montażowe stanowią:

Kolek rozporowy z tworzywa, typ MZ 8
Śruba do drewna, typ CNS – z łbem soczewkowym ze szczeliną
wg normy DIN 95 6 x 60 mm
Załączony zestaw montażowy przeznaczony jest do montażu na następujących podłożach:
Beton klasy B25
Blok wapienny pełny Ks12
Blok pumeksowy pełny V4
Cegła pełna M20

W przypadku innych podłoży należy stosować odpowiednie sprawdzone elementy montażowe. Muszą one spełniać wymagania wymienionych poniżej wartości obciążeń użytkowych:

Siła wyrwająca **600 N**

Grupa 12 = **Siedziska prysznicowe**

W przypadku konieczności montażu na innym typie podłoża, niż wymieniono powyżej, należy zaciągnąć rady firmy specjalistycznej, zajmującej się techniką połączeń.

Wymiary montażowe:

Siedziska prysznicowe należy montować na wysokości 460- 480 mm – odległość mierzona pomiędzy poziomem gotowej posadzki a górną powierzchnią siedziska.

Wiercenie otworów:

Otwory należy wiercić wiertłem o średnicy d = 8 mm prostopadle do podłoża, na głębokość co najmniej 60 mm. Powstały kurz należy usunąć z wywierconego otworu, aby zagwarantować pewne osadzenie kolka.

Dezynfekcja

Do dezynfekcji powierzchniowej używać np. preparatu BIG SPRAY firmy Antiseptica dopuszczonego do stosowania w placówkach służby zdrowia na podstawie pozytywnej opinii PZH nr HB/834/95/97 lub podobnych preparatów zaopiniowanych pozytywnie przez PZH.

Konserwacja i utrzymanie w czystości

Do konserwacji i utrzymania w czystości należy używać najlepiej roztworu mydła. Środek czyszczący musi posiadać wartość pH min. 6. Nie wolno stosować żadnych środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.

Obciążenie maksymalne: 150 kg

Producent:

Lehnen GmbH,
Kleinicherstr. 10,
54472 Longkamp,
Niemcy

Stand: 04/18



Lehnen GmbH
Kleinicher Straße 10
D - 54472 Longkamp
Tel. 06531/50057-0
Fax 06531/50057-1022



Montageanleitung

Duschsitze (Wandmontage) L120010*; L122110*

Sie haben ein Lehnen - Produkt gewählt. Wir sind sicher, daß Ihnen das Hilfsmittel mehr Mobilität und damit gute Dienste leisten wird. Unsere Produkte werden nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt.

Unsere Hinweise zu der Befestigung sind unbedingt zu beachten. Die Montage sollte durch eine Fachfirma erfolgen.

Befestigungsmaterial

Das jedem Artikel beigelegte Standardbefestigungsmaterial bestehend aus:

Kunststoff-Mehrweckdübel MZ 8
CNS -Holzschraube - Linsensenkopf mit Schlitz
DIN 95 6 x 60mm

Dieser Befestigungssatz ist geeignet für die Montage auf folgenden Untergründen

Beton B25
Kalksandvollstein Ks12
Bimsvollstein V4
Vollziegel M20

Bei anderen Untergründen sind geprüfte Befestigungsmaterialien einzusetzen. Diese müssen Gebrauchslastwerte nachfolgender Auflistung entsprechen.

Ausreißlast **600 N**

Gruppe 12 =

Duschsitze

Bei der Auswahl der Befestigungen für andere Wandtypen wie oben angegeben sollte eine Fachfirma der Befestigungstechnik hinzugezogen werden. Wandaufbau prüfen! Bei dicken Putzschichten, Beplankung oder Wandaufbauten ist entsprechend längeres Befestigungsmaterial zu verwenden. Die Angaben des Dübelherstellers sind zu beachten.

Montagemaße:

Duschsitze sind in einer Höhe von 460-480 mm Fertigfußboden / Oberkante Sitzfläche zu montieren.

Nach der Montage ist eine Funktionsprüfung durchzuführen!

Bohrverfahren:

Die Bohrungen sind mit einem Bohrer d=8mm rechtwinklig zum Untergrund und mindestens 60mm tief auszuführen. Der Bohrstaub ist aus dem Bohrloch zu entfernen um einen festen Sitz des Dübels zu gewährleisten.

Maximale Belastung: 150 kg

Stand: 04/18

